



AVANTAGES

- Sans danger pour les surfaces, même les plus fragiles
- Activité bactéricide, levuricide et virucide
- Contact alimentaire



Formule douce



APPLICATION


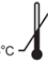
Lingettes à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante pour le nettoyage et la désinfection par contact des dispositifs médicaux non invasifs, instrumentation, matériels et équipements médicaux. Dispositif médical. CLASSE IIA.

MODE D'EMPLOI

Frotter les surfaces avec BACTINYL LINGETTES DESINFECTANTES INODORES. Respecter le temps d'action, après passage de la lingette, en fonction de l'efficacité recherchée. Laisser sécher. Ne pas rincer sauf en cas de contact avec des surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Bien refermer le couvercle après utilisation pour que le taux d'imprégnation soit optimum jusqu'à la dernière lingette. Ne remplace pas une désinfection par trempage.

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99, concernant les produits pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU LIQUIDE D'IMPREGNATION

Aspect :	liquide
Couleur :	incolore
Parfum :	inodore
Densité :	= 1
pH du produit :	base faible
Péremption :	 2 ans
Stockage :	 4°C - 35°C

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DU LIQUIDE D'IMPREGNATION

Activité bactéricide : EN 13727 (conditions de saleté – 1 min – 20°C), EN 14561 (conditions de saleté – 5 min – 20°C), EN 16615 (conditions de saleté – 2 min +/- 15 secondes – 20°C)

Activité levuricide : EN 13624 (conditions de saleté – 1 min – 20°C), EN 14562 (conditions de saleté – 15 min – 20°C), EN 16615 (conditions de saleté – 2 min +/- 15 secondes – 20°C)

Activité sporicide : EN 13704 (conditions de propreté – 60 min – 20°C)

Activité virucide : EN 14476 sur PRV*, BVDV*, H1N1, Herpès, Vaccinia virus, Rotavirus (conditions de saleté – 5 min – 20°C), Norovirus (conditions de saleté – 15 min – 20°C)

* *Swine Pseudorabies Virus (PRV)* et *Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV)* sont des substituts pour HBV et HCV.

CONDITIONNEMENT

Boite de 120 lingettes
Boite de 120 lingettes
Seau de 300 lingettes

Réf. LB920630
Réf. LB920710B
Réf. LB920620

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.